

Legen Sie den Walker nur in **sitzender Position** an und verwenden Sie die beigelegten Socken für optimale Hygiene und bestmöglichen Komfort.



### Vorbereiten des Walkers

- Die Luftkammern dürfen vor Anlegen des Walkers nicht gefüllt sein
- Gurte lösen, Frontschale entfernen, Zehenabdeckung und Fußklappe öffnen



### Den Fuß in den Walker stellen

- Die Ferse an der Rückseite anlegen
- Fußklappe und die Zehenabdeckung schließen




### Die Frontschale anlegen

- AIRCAST® Logo befindet sich über den Zehen
- Seiten der unteren Frontschale (Fußteil) befinden sich im Inneren des Walkers
- Seiten der oberen Frontschale befinden sich **außen am Walker**



### Gurte schließen

- Gurte von unten nach oben schließen (A, B & C)
- Gurte festziehen, sodass der Walker eng, aber bequem anliegt

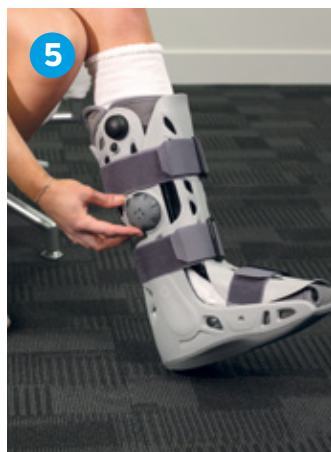

### Einstellen des Luftkammerdrucks

Zuerst Luftkammer auf der verletzten Seite auffüllen

- Drehrad auf der rechten Seite des Walkers zur entsprechenden Nummer drehen:
- Nummer 1: füllt Luftkammer rechts
- Nummer 2: füllt Luftkammer links
- Nummer 3: füllt Luftkammer hinten
- Nach Aufpumpen aller Luftkammern Drehrad auf das Lockzeichen stellen



### Aufpumpen der Luftkammern

- Mittig auf die große Pumpe (oben rechts) drücken und langsam wieder loslassen
- Pumpen, bis die Luftkammern eng, jedoch angenehm anliegen
- Vorgehen für die weiteren Luftkammern wiederholen
- Sollten die Luftkammern zu prall sein, etwas Luft ablassen

### Ablegen des Walkers

Für einen korrekten Sitz beim Wiederanlegen des Walkers, sollte die Luft vor Ablegen des Walkers abgelassen werden

1. Das große Auswahlrädchen bis zur entsprechenden Nummer der Luftkammer drehen (Abb. 5)
2. Die kleine, rechts oben am Walker befindliche Ablasstaste drücken
3. Vorgehen für die weiteren Luftkammern wiederholen
4. Gurte lösen, Frontschale entfernen und Zehenabdeckung sowie Fußklappe öffnen

### Größentabelle

Universal für beide Seiten, Größe = Schuhgröße

XS = 32-34	S = 35-38	M = 39-42	XL = 46-48	L = 43-45
------------	-----------	-----------	------------	-----------



### Vorsichtsmaßnahmen

- Luftkammern nicht überdehnen
- Die Haut regelmäßig auf Druckstellen und Hautreizungen untersuchen. Bei Hautveränderungen oder Unwohlsein den Luftkammerdruck reduzieren
- Den Walker nicht verwenden, wenn aufgrund von post-operativer Anästhesie, Nerven-, Haut- oder sonstigen Beschwerden kein Gefühl im Fuß oder Unterschenkel vorhanden ist

**Achtung!** Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung!

Vor Gebrauch der Orthese bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen: Die einwandfreie Funktion der Orthese ist nur bei richtigem Anlegen gewährleistet.