

**ARTROMOT®**

JETZT NEU:  
REZEPTSTATUS  
ONLINE  
ABFRAGEN!

Patienteninformation

# Ihre Rehabilitation in Bewegung

CPM-Therapie mit Bewegungsschienen  
für das Knie-, Schulter-, Ellenbogen- und Sprunggelenk




**enovis™**

## Ihre schnelle Mobilisation und Rehabilitation ist wichtig



Für Ihren Heilungsprozess ist die frühzeitige, passive und schonende Bewegung ohne Belastung ganz besonders wichtig. Deshalb hat Ihr Arzt Ihnen eine motorisierte Bewegungsschiene zur täglichen Bewegungstherapie zuhause verordnet.

Die Therapie mit einer motorisierten ARTROMOT® Bewegungsschiene fördert Ihren Heilungsprozess, weil sie:

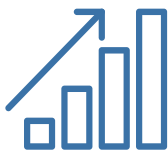

- nachweislich Ihre Schmerzen und Schwellungen lindert
- hilft Gelenkverklebungen und Versteifungen zu vermeiden
- die Heilung von Knorpel, Sehnen und Bändern beschleunigt
- die Funktion Ihrer Gelenke erhält und verbessert
- das OP-Ergebnis sichert
- Ihre Rehabilitationszeit verkürzt



Die Wirksamkeit ist in einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien\* nachgewiesen.

\* Die Studien können bei Bedarf bei Enovis angefordert werden



Das Original – Mietservice auf höchstem Niveau,  
direkt vom Hersteller!

## Trägt Ihre Kasse die Behandlungskosten?

Die meisten gesetzlichen Krankenkassen genehmigen die Kosten für die Versorgung mit motorisierten Bewegungsschienen **schnell und unkompliziert**.

Leider kann es in **Einzelfällen** dennoch zu Ablehnungen oder Kürzungen kommen.

## Sollte Ihre Versorgung davon betroffen sein, helfen wir Ihnen weiter!

- Wir unterstützen Sie im Dialog mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse.
- Wir stehen Ihnen bei Rückfragen mit Rat und Tat zur Seite.
- Besteht der Wunsch die ARTROMOT® Bewegungsschiene selbst anzumieten, ermöglichen wir Ihnen das gerne.



Deshalb gehören motorisierte ARTROMOT®  
Bewegungsschienen seit über 40 Jahren  
zum Behandlungsstandard.

# So kommt Ihre ARTROMOT® Bewegungsschiene zu Ihnen nach Hause



Wir erhalten Ihr Rezept und stellen in Ihrem Namen umgehend einen Antrag auf Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse.



Nach der Kostenfreigabe ruft Ihr Enovis-Patientenbetreuer Sie an und vereinbart mit Ihnen den Liefertermin Ihrer ARTROMOT Bewegungsschiene.



Ihr Enovis-Patientenbetreuer liefert Ihnen Ihre Bewegungsschiene nach Hause, stellt sie individuell für Sie ein und erklärt Ihnen den Gebrauch.



Ihr Enovis-Patientenbetreuer oder unser HOMECARE SERVICE sind während der gesamten Therapiedauer für Sie erreichbar und beantworten gerne alle Ihre Fragen zur richtigen Anwendung.



Bei Therapieende vereinbart Ihr Enovis-Patientenbetreuer mit Ihnen den Abholungs-termin der ARTROMOT® Bewegungsschiene.

## Digitale Rezeptübermittlung



### Gesicherte und erfolgreiche Rezeptübermittlung per FTAPI:



QR-Code einscannen oder Link eingeben:  
[enovis.ftapi.com/secuform/portal/rezeptmeldung](https://enovis.ftapi.com/secuform/portal/rezeptmeldung)



Rezept hochladen



E-Mail Adresse eintragen für Empfangsbestätigung



Absenden und auf Empfangsbestätigung achten!



Wichtig: Originalrezept postalisch an Enovis senden.

**Wir beraten sie gerne für eine erfolgreiche Kostenübernahme durch die gesetzlichen Versicherungen (GKV und GUV).**

## Digitale Rezeptauskunft

Wie lange dauert es, bis Ihr Rezept bearbeitet und Ihre CPM-Bewegungsschiene bei Ihnen zuhause ist? Das erfahren Sie jetzt ganz einfach und bequem online – mit unserer digitalen Rezeptauskunft!

Ähnlich wie die Sendungsverfolgung beim Paketdienst oder der Post, zeigt Ihnen die digitale Rezeptauskunft jederzeit flexibel und datenschutzkonform den aktuellen Status Ihrer Verordnung auf unserer Website an:

- Ihr Rezept ist bei Enovis in Bearbeitung
- Ihr Rezept ist zur Kostenfreigabe bei Ihrer Krankenkasse
- Ihre CPM-Bewegungsschiene ist auf dem Weg zu Ihnen

### So einfach können Sie die digitale Rezeptauskunft nutzen:



Scannen Sie den QR-Code, um direkt zur digitalen Rezeptauskunft auf unserer Website zu gelangen oder besuchen Sie uns unter:  
*[www.enovis-medtech.de/service/rezeptauskunft-bewegungsschiene](http://www.enovis-medtech.de/service/rezeptauskunft-bewegungsschiene)*



Geben Sie Ihre 10-stellige Versichertennummer ein (betrifft nur gesetzlich versicherte Patienten)



Erfahren Sie sofort den Status Ihrer CPM-Verordnung



### Kostenfreie Patienten-Hotline

Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr

Telefon: 0800 1 676 333

Telefax: 0800 3 676 333

E-Mail: [homecareservice@enovis.com](mailto:homecareservice@enovis.com)

## Weitere Therapiebegleitung bei **Knieverletzungen**



**Die digitale Gesundheitsanwendung\***  
**Orthopy unterstützt bei den Indikatio-**  
**nen vorderer Kreuzbandriss und Menis-**  
**kusschädigungen.**

Die Orthopy-App bei Knieverletzungen begleitet Patienten mit gezielten Übungen und zusätzlichen Informationen vor, während und nach orthopädischen Behandlungen. Sie bietet so eine effektive digitale Unterstützung in allen Phasen der Therapie.



**Informiere dich jetzt:**  
**[www.orthopy.de](http://www.orthopy.de)**

\* Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind bekannt als „App auf Rezept“. Sie werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und müssen hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Datenschutz entsprechen.

## enovis™

***Creating Better Together™***

ORMED GmbH, Bötzingen Straße 90, 79111 Freiburg, DEUTSCHLAND

***enovis-medtech.de***

### **Wichtiger Hinweis!**

Bitte beachten Sie, dass weder die Firma DJO, LLC, noch eine seiner Tochterunternehmen eine medizinische Beratung leisten können. Die Inhalte dieser Patienteninformation stellen keine medizinische, rechtliche oder professionelle Beratung dar. Informationen zu verschiedenen Gesundheits- und Fitnesszuständen sowie medizinischen Befindlichkeiten und deren Therapie ersetzen nicht die Beratung durch einen Arzt oder andere medizinische Fachkräfte. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Informationen dienen nicht der Diagnose eines Gesundheits- oder Fitnessproblems oder einer Erkrankung. Ob und welche Behandlung für Sie medizinisch sinnvoll ist, kann nur Ihr Arzt oder eine medizinische Fachkraft entscheiden.

Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.