

## Anlegeanleitung

# PROCARE® XcelTrax® Air Walker




1 Stellen Sie den Fuß so in den Innenschuh der Orthese, dass die Ferse gut in den hinteren Teil des Innenschuhs passt.



2 Schließen Sie den Klettverschluss des Polsters im Fußbereich sowie am Schienbein. Der Innenschuh sollte eng, aber angenehm anliegen.



3 Schließen Sie die Klettverschlüsse von unten nach oben. Die Klettverschlüsse sollten fest angezogen werden, aber nicht einschnüren. Wenn sich der Schwellungsgrad ändert, kann es erforderlich sein, die Gurte anzupassen.

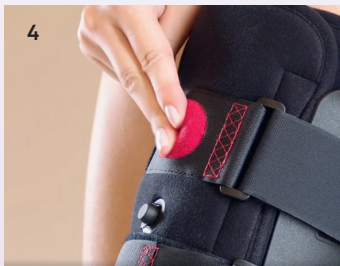

4 Zum Aufblasen der Luftkammer drücken Sie die integrierte rote Pumpe. Pumpen Sie, bis das Polster angenehm aufgepumpt ist und ein gutes Stabilitätsgefühl eintritt. Nicht übermäßig aufpumpen.



5 Um die Luft abzulassen oder die Kompression anzupassen, halten Sie die Taste zum Ablassen der Luft gedrückt und lassen die Luft ab, bis der Druck angenehm ist.

## Ablegen der Orthese

Lassen Sie zunächst die Luft aus der Luftkammer ab und öffnen Sie alle Gurte. Öffnen Sie dann das Polster und bringen den Fuß vorsichtig nach vorne und aus der Orthese heraus.

## Hinweis

Für zusätzlichen Komfort können Sie die zusätzlichen rechteckigen Polster im Inneren des Polsters anbringen, z.B. unter den Gurten oder zwischen Schale und Polster.

## Größentabelle

Universal für beide Seiten, Größe = Schuhgröße: XS = < 36 | S = 36-39 | M = 39-43 | L = 44-46 | XL = > 46

### Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass weder DJO, LLC, noch eine seiner Tochtergesellschaften medizinische Ratschläge geben können. Die Inhalte dieser Broschüre stellen keine medizinische, rechtliche oder andere Art professioneller Beratung dar. Informationen im Hinblick auf unterschiedliche Gesundheitszustände, Erkrankungen und körperliche Verfassungen und deren Behandlung sind nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal gedacht. Die Ergebnisse können individuell unterschiedlich sein. Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden und es können keine Rechtsansprüche gegen die Verfasser der Broschüre oder gegen denjenigen, der die Broschüre übergeben hat, abgeleitet werden.

 **ACHTUNG!** Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung!  
Vor Gebrauch der Orthese bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.



Y. Sung Handelsvertretung  
Düsseldorfer Str. 24, 40211  
Düsseldorf Germany



DJO, LLC  
5919 Sea Otter Place, Suite 200  
Carlsbad, CA 92010  
USA

Vertrieb durch:  
ORMED GmbH  
Bötzingen Straße 90  
79111 Freiburg  
Service-Hotline: 0180 1 676 333

